

### 【货号】

DZ9021ID

DZ9020ID

### 【组分】

10 块滤纸片DrySpot-ID® (2个印圈 DZ9021ID或4个印圈DZ9020ID) (Immundiagnostik AG)

### 【自备材料】


采血针 (2mm)、密封袋、干燥剂、酒精棉片、创可贴、干净的一次性纸巾 (如手帕、厨房纸巾)、信封

### 【操作步骤】

1. 在干血斑采集卡正面标签上填写样本信息 (图1)。
2. 末梢血采样:



- a. 准备好采血针和酒精棉片
- b. 用肥皂和温水洗手, 然后用干净的干纸巾擦拭。
- c. 准备采血针: 顺时针转动黄色保护销并取下 (图2)。
- d. 按摩中指或无名指指尖并用酒精棉片擦拭。指尖干燥后, 用采血针刺指尖 (图3)。
- e. 不采集第一滴血。将针刺部位凑近滤纸片, 让第二滴血滴于滤纸上 (图4), 每个滤纸印圈约需50µl血液。血液充分吸收透过滤纸, 填满印圈, 不要在一个圈上重复采血, 避免触摸或涂抹血斑。

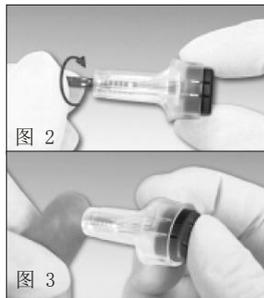


**注意:** 对于每个需要的参数, 至少用血液填满一个印圈。过满的印圈是没有问题的。血液未渗透滤纸或未填满印圈无法检测 (图4)。

3. 让血液滤纸片在室温下自然干燥 (至少60分钟), 充分干燥后与干燥剂一起放入密封袋中。  
**注意:** 避免阳光直射; 干燥过程中不允许加热、叠放或接触其他表面!
4. 48小时内将密封袋送往或邮寄到实验室。
5. 仔细清洁所有受污染的表面。在常规垃圾中处理所有检测组分。

### 【注意事项】

1. 仔细阅读并按照说明书操作;
2. 仅在滤纸的一面采血;
3. 在一个印圈上不可追加滴血;
4. 采末梢血时不要将滤纸片压迫针刺部位采血;
5. 将采血后的滤纸片连同干燥剂一起放入密封袋中。可确保样本干燥地到达实验室。高湿度可能会使检测结果有误!

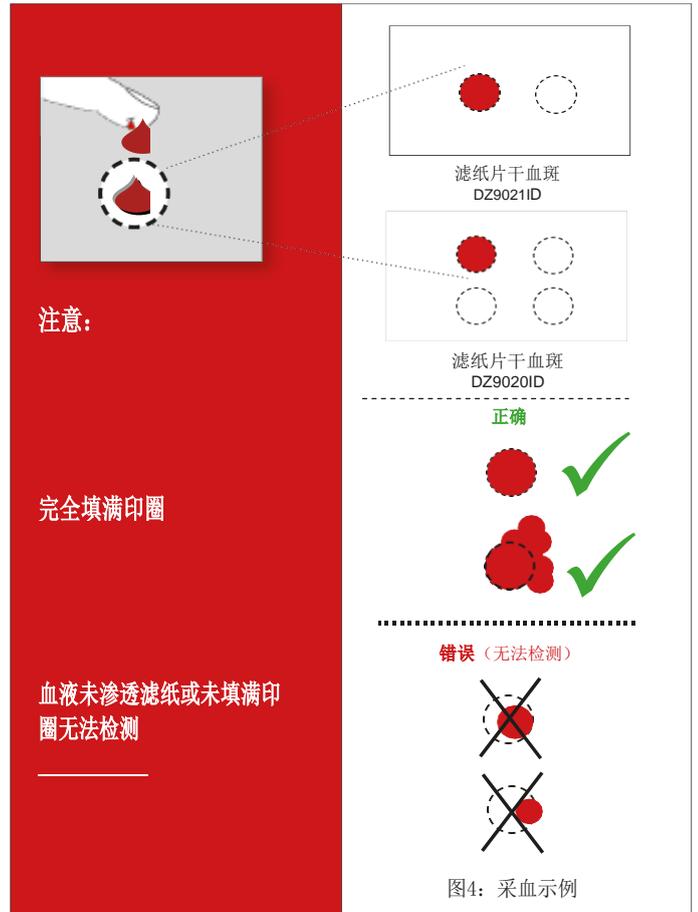

CE

	温度极限		制造商
	体外诊断医疗器械		批号
	货号		有效期
	远离阳光		请勿重复使用
	查阅使用说明		含量足够测试 <math>n</math> 次
	与...一起使用		

### 【基本信息】

生产企业名称: Immundiagnostik AG  
 住所: Stubenwald-Allee 8a, 64625 Bensheim, Germany  
 生产地址: Stubenwald-Allee 8a, 64625 Bensheim, Germany  
 电话: +49 6251 70190-0 传真: +49 6251 70190-363  
 邮箱: info@immundiagnostik.com  
 网址: [www.immundiagnostik.com](http://www.immundiagnostik.com)  
 中国总代理商及售后服务单位名称:  
 广东固康生物科技有限公司  
 住所: 广州市黄埔区开源大道11号加速器B4栋405-410室  
 电话: 020-32293176 18927505895 (微信同号)  
 传真: 020-32293177  
 邮箱: sales@gucon.com  
 网址: [www.gucon.com](http://www.gucon.com)

仅供参考, 请以原版英文说明书为准!